



Spirare

EKG - kort brukerveiledning

Oppsett for papirhastighet, amplitude, endring av utskriftsrapporter etc. gjøres fra menylinjen under INNSTILLINGER ⇒ KONFIGURASJON ⇒ EKG.

Start Spirare

- Integrasjon med journalsystem: Velg pasient i journalsystemet og start Spirare fra menyvalg i journalsystemet.
- Ingen integrasjon: Logg på med brukernavn og passord. Søk frem pasient ved å angi f.eks. de første bokstavene i etternavnet og klikk SØK [eller trykk ENTER]. Dobbelklikk [eller trykk ENTER] for å hente valgt pasient.
- Vinduet *Journal* vises med en oversikt over tidligere undersøkelser.

Nytt EKG opptak

- Fest elektrodene til pasienten. Klikk «elektrodeplassering» på skjerm for å se illustrasjon.
- Kontroller at EKG-opptaker er koblet til PCen.
- Klikk på ❤️ på knapperaden for å starte Hvile-EKG. For å starte Rytme-EKG, bruk menyen EKG / velg undersøkelse.
- Løpende EKG komplekser vises på skjermen.
- Trykk LAGRE- knappen for å lagre det EKG-signalet som vises på skjermen (siste 10 sekunder).
- Lukk bildet for å gå tilbake til journalen.
- Undersøkelsen legges øverst i listen i *Journal*.

Se på tidligere EKG opptak

- Enkelt måling: Dobbelklikk [eller bruk PILTASTER og ENTER] på ønsket undersøkelse i *Spirare-journalen*.
- Sammenligning av målinger: Marker to eller tre tester i *Journal* ved å klikke på målingen samtidig som CTRL holdes nede. Trykk deretter ENTER.

Rapport / Utskrift

- Dobbel-klikk på ønsket undersøkelse i *Spirare-journalen*.
- Velg PASIENT ⇒ UTSKRIFT eller klikk på 🖨️ på menylinjen.

Avslutt Spirare

- Klikk på krysset øverst til høyre eller velg PASIENT ⇒ AVSLUTT for å avslutte hele programmet.