


For å fullføre Spirare-prosessen, må du gå gjennom følgende trinn:

#### Integrasjon med din web-baserte EPJ (på hver eneste PC)

- Finn mappen X:\Spirare (hvor X er driven der du installerte Spirare, eks C: eller P:)
- Høyreklikk på filen Spirare3.exe og velg «Kjør som administrator»  
Bruk lokal administrator brukernavn og passord
- Logg deg inn i Spirare med brukernavn SPIRARE uten passord
- Klikk på menylinjen «Innstillinger» og deretter «Konfigurasjon»
- Klikk på ikonet «Program» på venstre siden
- Klikk på knappen «Opprett WebEpj Link»
- Avslutt Spirare

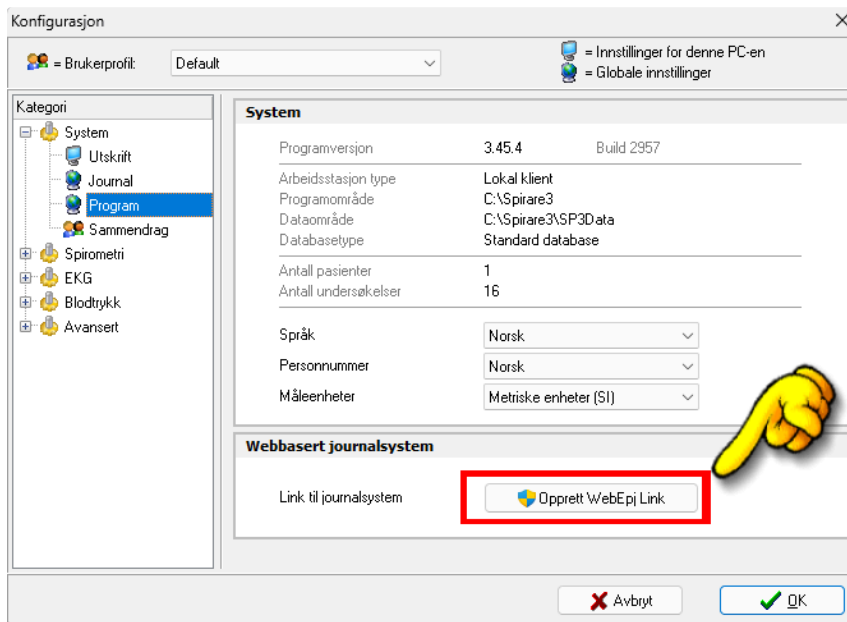

#### Opprette Spirare medarbeider

Alle behandlere (det vil si legene, og for noen journaler også helsesekretærer) må registrere seg i Spirare. Når Spirare startes fra EPJ for første gang, vil initialene til behandleren sendes til Spirare for å registrere navn på rekvirenter og medarbeidere som logger seg inn.

Fyll inn feltene og klikk på "Neste". Ikke opprett passord, bare klikk på "OK". Neste gang legen rekvirerer test, åpnes Spirare direkte.

TIPS: Hent pasienten "Line Danser". Starte Spirare én gang for alle legene. Da har du unnagjort brukerregistreringen.

Ny Spirare-konto



## Velkommen til Spirare

Registrering av ny Spirare-medarbeider

Du har nå startet Spirare for første gang fra ditt pasientjournalssystem, og vi vil derfor opprette en ny Spirare-profil for deg. Systembrukernavn er allerede hentet inn - vi ber om at du også fyller ut feltene for ditt etternavn, fornavn, tittel og brukerprofil.

Konto for  
**AA**

Ditt etternavn

Fornavn

Tittel

Brukerprofil **Default** ▼

Administrator

**X** Avbryt

### Opprette pasienter

Spirare har sin egen pasientdatabase. Pasientens demografiske informasjon (utenom høyde og vekt) sendes fra EPJ til Spirare. Hvis pasienten allerede er registrert i Spirare, vil Spirare åpnes, og pasientjournalen hentes, klar for en undersøkelsestest. Hvis pasienten ikke er registrert tidligere i Spirare, vises en boks for å legge til høyde og vekt (resten av informasjonen fylles automatisk fra EPJ).

Pasientdata - Rediger pasient

Pasient Kontaktinfo Arbeidsgiver Annet

Etternavn

Fornavn

Fødselsnummer

Kjønn

Opprinnelse

Høyde

Vekt

Journal ID: 10000001

Testpasient

### Kjøre en undersøkelsestest

Spirare åpnes med pasientjournalen klar for å kjøre en undersøkelsestest. Når du trykker "Lagre" i Spirare er testen lagret i Spirare og i Web-EPJ i samme sekund.

**VIKTIG:** De fleste Web-EPJ sender en "token" til Spirare ved oppstart (dette er en usynlig prosess) . "Token" fra **WebMed og Pasientsky** kan brukes til å lese inn én eneste PDF til journal. Det viktige som alle medarbeidere må lære, er å avslutte Spirare mellom hver undersøkelse. Har man glemt seg, kan man restarte Spirare fra EPJ, høyreklikke på undersøkelsen og velge "Send til Journal".

**Pridok** er et unntak. Pridok kan i mot flere enn én PDF per økt (Spirare bør avsluttes daglig).

Vi anbefaler deg å lese manualen eller se opplæringsvideoer på våre hjemmesider:

[📄 Ressurser](#)